



DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

FICHA TÉCNICA ACOPLE Y



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	
USOS	Es una unión directa para tres mangueras de 6 milímetros. Ideal para montajes varios.	
MATERIAL	Policarbonato transparente de alto impacto.	
RECOMENDACIONES	Evitar exponerlo a líquidos como el alcohol, no esterilizar en autoclave. Si este dispositivo hace parte de un kit, para realizar una técnica con el equipo de ozono. Se debe separar de las demás piezas y esterilizarlo solo.	
REGISTRO SANITARIO INVIMA (ACCESORIO)	Equipo: 2020DM-0022366 --- EXP: 20191229 Planta: certificado 20201197505 --- 26 10 2020	
NOTA	Este dispositivo viene con el equipo.	
ESTERILIZACIÓN	Por peróxido de hidrógeno en plasma. Previa detergencia por lavado manual con detergente neutro, retirando residuos con un cepillo suave, enjuagar con agua externa e internamente con ayuda de una jeringa; dejar secar colgado para retirar la humedad del interior, empacar para enviar a esterilización según protocolo institucional.	
FABRICANTE	ZHIYANG CO	
DIRECCIÓN TECNICA	JOIMER AGREDO, ING. DE DESARROLLO	Abril 1 de 2023

WWW.VIDOX.CO

Correo: vidoxmedsas@hotmail.com PBX:482 62 86 CEL: (+57) 3112311979 / 3196140277