



DISEÑO, DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

FICHA TÉCNICA APLICADOR MANUAL



DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	
USOS	Aplicador de uso fijo, para facilitar la aplicación del ozono directoy tópico al paciente.	
DIMENSIONES	13 cm de largo,10 mm de diámetro. Un extremo conexión luer lock macho, otro extremo manguera 6 mm.	
MATERIALES	Acero inoxidable grado medico 316.	
REGISTRO SANITARIO INVIMA (ACCESORIO)	Equipo: 2020DM-0022366 --- EXP: 20191229 Planta: certificado 20201197505 --- 26 10 2020	
FABRICANTE	VIDOXMED SAS.	
NOTA	Este dispositivo viene con el equipo. Si este dispositivo hace parte de un kit, para realizar una técnica con el equipo de ozono. Se debe separar de las demás piezas y esterilizarlo solo.	
ESTERILIZACIÓN	Por óxido de etileno. Previa desinfección por lavado manual con detergente enzimático, retirando residuos con un cepillo de filamentos suaves; Después se enjuaga con agua a 40°C y se deja secar. Al final se ubica en la bandeja para posterior esterilización.	
DIRECCION TECNICA	JOIMER AGREDO, ING. DE DESARROLLO	Abril 1 de 2023

WWW.VIDOX.CO

Correo: vidoxmedsas@hotmail.com PBX:482 62 86 CEL: (+57) 3112311979 / 3196140277